


Návod k použití bandáže Equicast

Pokud je teplota vzduchu vyšší než 27°C dejte sáček s bandáží asi na 10 minut do studené vody před jeho otevřením. Pokud potřebujete více času na bandážování nenamáčejte bandáž před aplikací, ale použijte např. mokrou houbu a namočte až zabandážované kopyto. Jinak použijte latexové rukavice, otevřete sáček s bandáží, namočte bandáž do kbelíku se studenou vodou asi na 5 sekund a poté vyždímejte přebytečnou vodu. Od tohoto momentu máte asi 1 minutu než začne bandáž tvrdnout



Vyčistěte dokonale kopyto od všech známek infekce bílé čáry, případně aplikujte léčebné přípravky před bandážováním.

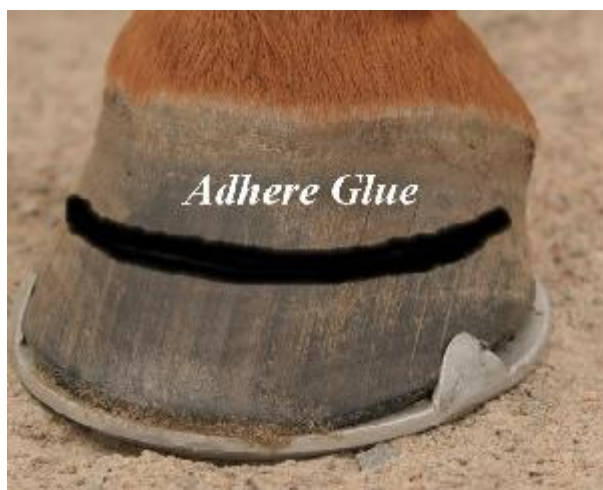

Při čištění kopyta nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, kopyto pouze zbavte všech mazadel a olejů a vysušte ho pokud je mokré. Naneste malé množství lepidla (např. Adhere) cca v polovině kopyta a bezodkladně začněte balit kopyto Equicastem. Po prvních několika omotáních přitlačte bandáž k lepidlu aby se lehce prosáklo.



Obr. 1) Uchopte kopyto jako při strouhání a začněte omotávat. Začněte po pravé ruce na kopytu v úrovni posledních podkováků. Začněte s obvazováním na úrovni okraje srsti na jedné straně a pokračujte na zemní stranu patek na druhé straně. Obvažte kopyt tak, aby zhruba 2/3 obvazu pokrývaly kopyto a 1/3 obvazu zakrývala chodidlovou část: Spodní část kopyta by měla vypadat jako zámek podkovy překrývající střelku. Obvaz nesmí překrývat měkké části patek. Omotejte kopyto asi 8x, zbývající část odřízněte.



Obr.1



Obr.2

Obr. 2) Položte kopyto na tvrdý podklad (nebo podložku), tím se bandáž natlačí do chodidla a podpoří chodidlo a střel. Zvedněte druhou nohu na 30-45 sekund, tím se docílí roztažení právě zabandážovaného kopyta právě bandáže.

POZOR: žádná část bandáže nesmí překrývat linii srsti nebo měkké tkáně patek, pokud se tak stalo, tak příslušnou část bandáže během tvrdnutí odřízněte.



Obr. 3) Jakmile bandáž vytvrdne (asi 5 minut) upravte tvar bandáže rašplováním do požadovaného tvaru. Přibijte nebo přilepte podkovu dle potřeby. Bandáž se může použít s podkovou nebo bez podkovy dle potřeby a aktuálního stavu kopyta.

Obr.3

